




DEX™

A WIRELESS WORLD


DK

COM-DEX


WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING

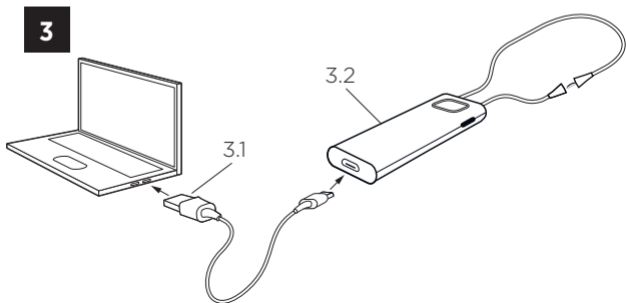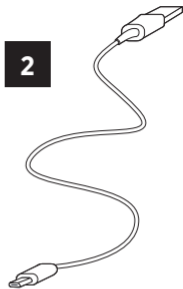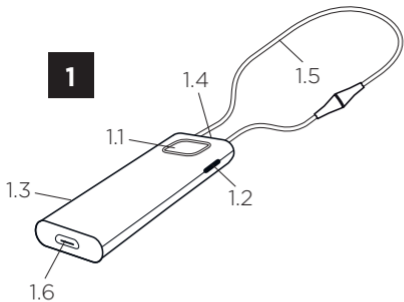

4

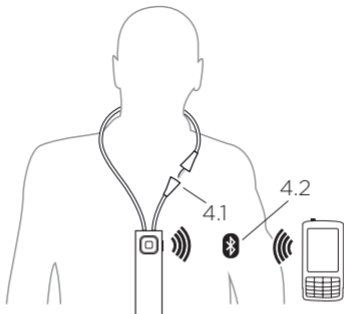

5

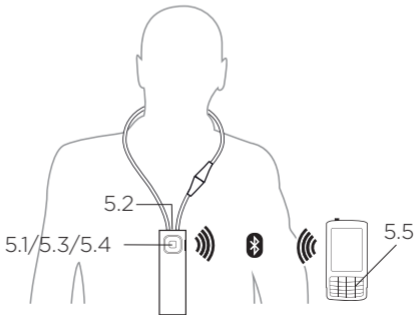

BESKRIVELSE AF ENHEDEN – *se illustration 1*

- 1.1 Trykknop
- 1.2 HA-mik Fra-knap
- 1.3 LED
- 1.4 Mikrofon
- 1.5 Hals-slynge
- 1.6 Mikro-USB

Bemærk: Læs disse instruktioner grundigt, inden du tager enheden i brug.

Påtænkt anvendelse

Enheden er beregnet til at forbedre høreapparatbrugeres evne til at føre telefonsamtaler, mens de bruger deres høreapparat. Ved at udstyre brugerne med en smartphone-baseret kontrolmetode bliver høreapparaterne nemmere at betjene og brugervenligheden forbedres.

Bemærk: Enheden bruger Bluetooth, som findes på de fleste nyere mobiltelefoner.

TILBEHØR – *se illustration 2*

2.1 USB-kabel

OPLADNING – *se illustration 3*

- 3.1 Tilslut USB-kablet til enheden og strømforsyningen. Vi fraråder, at de to dele af halsslyngen sættes sammen, mens enheden oplades.
- 3.2 Rødt lys: oplader, grønt lys: fuldt opladet.

Batterilevetid: 8 timers streaming, 8 dages standby.

ANVENDELSE – *se illustration 4*

- 4.1 Sæt de to dele af halsslyngen sammen. Halsslyngen fungerer som tænd/sluk-kontakt.
- 4.2 Par enheden med din mobiltelefon ved hjælp af Bluetooth.

Sådan parres enheden med din telefon

Første gang, du parrer enheden med din telefon, skal du følge disse trin:

1. Sørg for, at enheden og telefon er inden for 1 meters indbyrdes afstand.
2. Tilslut halsslyngen. Enheden blinker rødt og blå.
3. Aktivér Bluetooth på din telefon.
4. Start parringsprocessen for enheden i henhold til instruktionerne i brugsanvisningen til din telefon.
5. Din telefon viser en liste over Bluetooth-enheder.
Vælg COM-DEX fra listen.

Når du først har parret enheden, bliver den ved med at være parret, selvom du afbryder halsslyngens tilslutning.

Indgående opkald – se *illustration 5*

- 5.1 Besvar opkald: Tryk på trykknappen.
- 5.2 Tal ind i mikrofonen, mens enheden hænger om din hals.
- 5.3 Afslut opkald: Tryk på trykknappen.
- 5.4 Afvis opkald: Langt tryk på trykknappen.

Bemærk: Det er også muligt at besvare og afslutte opkald på mobiltelefonen. Bemærk, at på nogle mobiltelefoner skal du måske vælge COM-DEX fra en liste over enheder. Ellers transmitteres lyden gennem telefonens højttalere.

Udgående opkald – se *illustration 5*

- 5.5 Ring op fra telefon.

Bemærk: Du kan også bruge enheden til at streame lyd fra alle elektroniske lyd-kilder til dine høreapparater.

Lydjustering under brug

Lydstyrken justeres på mobiltelefonen.

For at lukke lyde fra omgivelserne ude: Tryk på HA-mik Fra-knappen – *se illustration 1*.

Bemærk: Hvis du befinder dig i særligt støjende omgivelser eller har brug for at øge lydstyrken til over det normale niveau, mens du streamer lyd til høreapparaterne, så hold HA-mik Fra-knappen nede i 5 sekunder. For at vende tilbage til dit normale lydniveau skal du trykke på HA-mik Fra-knappen igen og holde den nede i 5 sekunder.

Du kan downloade COM-DEX appen fra App Store eller fra Google Play. Med denne app kan du bruge telefonen som fjernbetjening.

VEDLIGEHOELSE

- Rengøres med en fugtig klud. Der må ikke bruges kemikalier.
- Må ikke udsættes for kraftig varme/kulde eller høj fugtighed.
- Må ikke lægges i væske.
- Når enheden ikke er i brug, skal den opbevares på et tørt sted, hvor børn og kæledyr ikke kan få fat i den.
- Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere udstyret. Dette må kun udføres af autoriseret personale.

OPLYSNINGER OM EMISSION

Emissionsniveauerne fra Widex enheder er adskillige gange lavere end de niveauer, der transmitteres af mobiltelefoner og andet kommunikationsudstyr.

For at få yderligere oplysninger, der gælder specifikt for patienter med medicinske implantater, kan du downloade dokumentet: Information om WidexLink™™ fra www.widex.com/widexlink

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Enheden virker ikke	<ul style="list-style-type: none">a) Lavt batteriniveaub) Mobiltelefonen er indstillet til lydløs tilstandc) Lavt batteriniveau i høreapparatd) Uden for rækkevidde	<ul style="list-style-type: none">a) Oplad enhedens batterib) Skift til normal tilstandc) Udskift batteriet i høreapparatetd) Bluetooth har en rækkevidde på op til 10 m.
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none">a) Ikke tilsluttet via Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">a) Gentag parringsprocessen

Hvis problemet fortsætter, kontakt høreklinikken.

ADVARSLER



ADVARSEL

- Brug ikke enheden i miner eller andre områder med eksplosive luftarter.
- Når enheden anvendes sammen med udstyr, som er tilsluttet via et mikro-USB-kabel, f.eks. en oplader, en PC, en lydkilde eller lignende, skal sikkerhedsreglerne for dette udstyr overholdes, som angivet i IEC 60065, IEC 60950-1, IEC 60601-1 eller tilsvarende standarder.

Direktiv 1999/5/EF

Undertegnede Widex A/S erklærer herved, at følgende udstyr COM-DEX overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.







En kopi af Overensstemmelseserklæringen kan findes under:






<http://www.widex.com/doc>



SYMBOLER

Symboler, som ofte anvendes af Widex A/S på pakkematerialet (etiketter, brugsanvisninger mv.) til medicinsk udstyr

Symbol	Titel/beskrivelse
	Producent Sammen med dette symbol angives navn og adresse på den producent, der har produceret produktet. Såfremt det er relevant, angives produktionsdatoen også.
	Produktionsdato Den dato, hvor produktet er produceret.
	Batchnummer Produktets batchnummer (identificering af batch)
	Katalognummer Produktets katalognummer (varenummer)
	Serienummer Produktets serienummer*
	Se brugsanvisningen Brugsanvisningen indeholder vigtig sikkerhedsinformation (advarsler/forholdsregler) og skal læses, inden produktet tages i brug.

Symbol	Titel/beskrivelse
	Advarsel Tekst markeret med symbolet for advarsler og forholdsregler skal læses, inden produktet tages i brug.
	WEEE-mærke "Må ikke kasseres som almindeligt affald" Når produktet skal kasseres, skal det sendes til et autoriseret indsamlingssted for genbrug og genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.
	CE-mærke Produktet overholder kravene i EU-direktiverne for CE-mærket udstyr.
	RCM-mærke Produktet overholder de lovgivningsmæssige krav (elektrisk sikkerhed, EMC og radiospektrum) til produkter, der leveres til det australske eller newzealandske marked.
	Interferens Elektromagnetisk interferens kan forekomme i nærheden af produktet.

*Serienummeret er det 6- eller 7-cifrede nummer på produktet. Serienummeret kan være påtrykt uden foranstillet **SN**



WIDEX A/S

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø, Denmark
www.widex.com



Manual no.:
9 514 0313 080 #04
Issue:
2018-09



9 514031 308000

COM-DEX with firmware 1.3 and newer